



## FlexSupport Manuell



### Übereinstimmung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR), Klasse I.



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für FlexSupport von EVIBO entschieden haben.

Dieses Kissen wurde entwickelt, um seitlichen Halt und Komfort zu bieten. Es wird mit einer PU-Abdeckung, einer Kunststoffrückenstruktur und PU-Schaum für Langlebigkeit und Komfort hergestellt. Das Kissen ist geeignet für Rollstühle, Relaxsessel, Heimsessel, Stühle und andere Sitzgelegenheiten.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der FlexSupport ist für den Einsatz als seitliches Stützkissen für Personen mit eingeschränktem Rumpfgleichgewicht vorgesehen. Er stützt die Seiten des Rumpfes, wenn man auf einer Sitzgelegenheit sitzt.

## Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit:

- Aktive Druckgeschwüre oder starke Hautirritationen am Rücken oder an den Flanken
- Schwere Erkrankungen der Wirbelsäule ohne Rücksprache mit einem Arzt
- Bekannte Allergie gegen Polyurethan (PU) oder Kunstleder
- Personen über 120 kg Körpergewicht
- Situationen, in denen sich das Kissen durch unkontrollierte Bewegungen verschieben kann

## Productcomponenten

- Rückenteil mit 2 verstellbaren Klickschnallen (hinten rutschfest und vorne Velcro).
- Pelot rechts (unterer Velcro).
- Pelot links (unterer Velcro).

## Manuell

1. Befestigen Sie das Rückenteil mittels der Klickschnalle an der gewünschten Rückenlehne und ziehen Sie die Gurte fest. Dies kann vertikal oder diagonal erfolgen. Finden Sie heraus, was am besten zur Rückenlehne Ihres Stuhls passt.



2. Positionieren Sie die Polster mit der Velcro-Seite auf der Rückenlehne zwischen Hüfte und Achseln.  
**HINWEIS: Die allmählich abfallende Seite der Ballen sollte in Richtung Achselhöhle zeigen.**



3. Stellen Sie das Kissen so ein, dass es auf beiden Seiten Ihres Oberkörpers eng anliegt. Achte darauf, dass die Flügel deine Seiten umschließen, um zusätzlichen Halt zu bieten.



## Reinigung

- Entfernen Sie die PU-Abdeckung, indem Sie den Reißverschluss öffnen.
- Waschen Sie den Bezug in der Waschmaschine mit einem Feinwaschmittel bei maximal 60°C.
- Reinigen Sie die Kunststoff-Trägerstruktur und den PU-Schaum mit einem feuchten Tuch.

## Sicherheit

### ⚠ Wichtig:

- Verwenden Sie das Kissen nicht als Spielzeug.
- Eine falsche Platzierung kann zu einer unzureichenden oder falschen Unterstützung führen.
- Ein locker sitzendes Kissen kann sich verschieben und zu Instabilität führen.
- Bei längerem Gebrauch ohne Haltungsanpassung kann es zu Druckstellen kommen.
- Eine schlechte Reinigung kann zur Ansammlung von Bakterien oder Allergenen führen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen fern.

## Welche Nebenwirkungen sind möglich?

- Druckstellen bei längerem Gebrauch ohne Haltungswechsel.
- Hautreizungen aufgrund der Empfindlichkeit gegenüber den verwendeten Materialien.
- Verringerte Stabilität bei falscher Befestigung.

## Instandhaltung

- Regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen prüfen.
- Tauschen Sie das Kissen aus, falls die Form verloren geht oder der Bezug beschädigt ist.
- Die erwartete Lebensdauer des Produkts beträgt 2 Jahre bei normalem Gebrauch.

## Lagerung und Verwendungsbedingungen

- Bei Raumtemperatur zwischen 5°C und 40°C lagern.
- Vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Hersteller- und Kontaktinformationen

### Markeninhaber und verantwortlich für das Marketing in der EU:

Adresse: Evibo Medizin  
Rijksweg 10, 5953 AE Reuver, Niederlande

Website: [www.evibo.nl](http://www.evibo.nl)

E-Mail: [info@evibo.nl](mailto:info@evibo.nl)

## Produktdetails:



FlexSupport



MODEL: PU491840 Butterfly Embracing Wheelchair Lumbar Cushion



2025-06-07



20250607



120kgs



Company: Dongguan China Effort Healthcare Products Co., Ltd.  
Address: 39th Jinyuan Road, Liaobu Town, Dongguan City Guangdong  
Province, China



SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7 2909 VA Capelle aan den IJssel  
Nederland



(01)8720892657404(11)250607(10)20250607